

VAMOS AL COLEGIO

Venta mayorista de uniformes escolares



**Mascarillas higiénicas
reutilizables**

70 lavados – UNE0065

MASCARILLA REUTILIZABLE

DETALLES DE CERTIFICACIÓN:



EFICACIA FILTRACIÓN AEROSOLES > 97%

EFICACIA FILTRACIÓN PARTÍCULAS > 95%

* Pruebas realizadas según norma UNE-EN14683:2019. UNEEN0065/2020

Después de 70 lavados el tejido mantiene las propiedades de filtración bacteriana y respirabilidad tal como indica la norma UNE-EN 0065

Garantiza la protección contra aerosoles sólidos y líquidos.

Garantiza una hermeticidad adecuada frente a la atmósfera ambiental.

Resistente a la penetración de efecto hidrófugo.

No se han utilizado en su fabricación latex/ caucho natural.

Se han evaluado los riesgos (Ley 31 -1995), y sus desarrollos reglamentarios.

Resistencia al peeling.

No desprende pelusas.

Prueba: UNE-EN149:2001+A1-2010.

Resultado: Filtración de partículas de 0.3 micras de diámetro y mayores, equivalente a una eficacia de filtración de al menos 95%. Cumple la normativa vigente para confección de mascarillas.

Esquema de los resultados antes de los lavados (sin lavar)	RESULTADOS
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) (%)	>96
Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019	
Respirabilidad (Presión diferencial) (Pa/cm2)	<38
Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019	
Resultados medidos con dispositivo Shirley Air Permeability Tester.	
Esquema de los resultados después de 5 lavados a 60°C	RESULTADOS
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) (%)	>96
Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019	
Respirabilidad (Presión diferencial) (Pa/cm2)	<38
Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019	

**Certificado emitido por CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO
PARA LA LIMPIEZA, S.L**

FABRICADO EN ESPAÑA

EMBALAJE E INSTRUCCIONES DE USO



EMBALAJE

Las mascarillas higiénicas reutilizables de Vamos al colegio SL vienen embaladas en bolsas individuales totalmente protegidas frente a cualquier daño mecánico y frente a cualquier tipo de contaminación.


El tallaje es el siguiente:

- Talla S – Infantil – 3 a 5 años
- Talla M – Primaria – 6 a 10 años
- Talla L – Adulto pequeña
- Talla XL – Adulto grande


"ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425"

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

Adulto

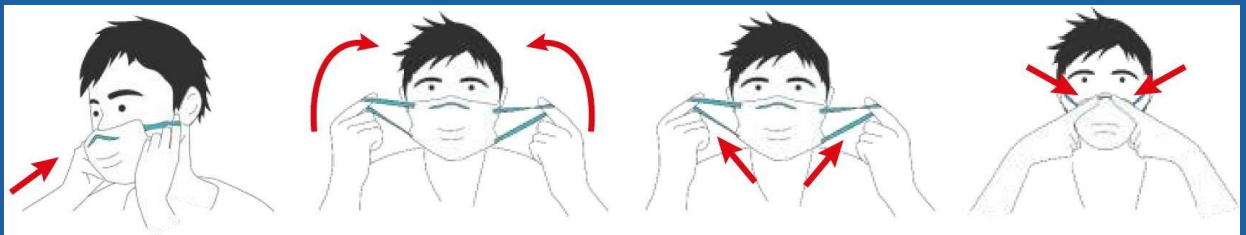

Niños

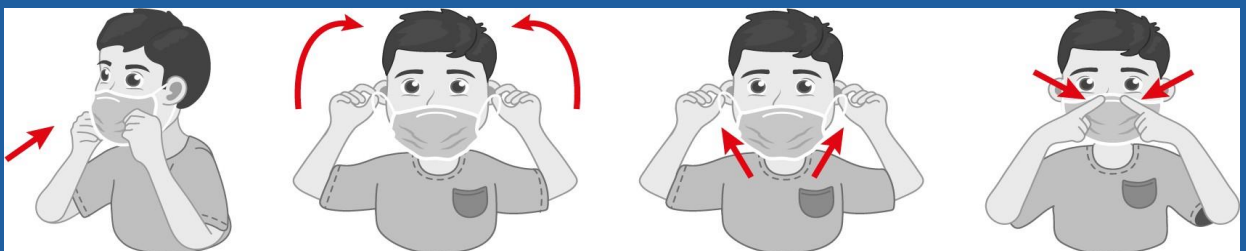

EMBALAJE, MARCADO E INSTRUCCIONES DE USO



INSTRUCCIONES DE USO DE LA MASCARILLA

1. Generalidades

La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad:

[https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf)

NOTA Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación, por esta razón, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.

2. Colocación de la mascarilla

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.




2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Si se dispone de pinza nasal, ajustarla a la nariz.

Adulto



Niño

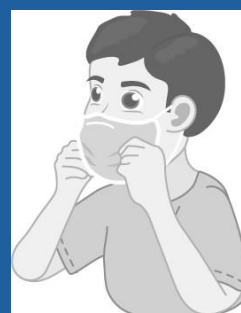

EMBALAJE, MARCADO E INSTRUCCIONES DE USO




4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.

Adulto



Niño

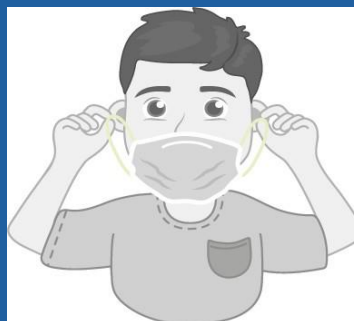

5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.

Adulto



Niño



6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.

EMBALAJE, MARCADO E INSTRUCCIONES DE USO



7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz (si existe).

Adulto




Niño




8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

Adulto

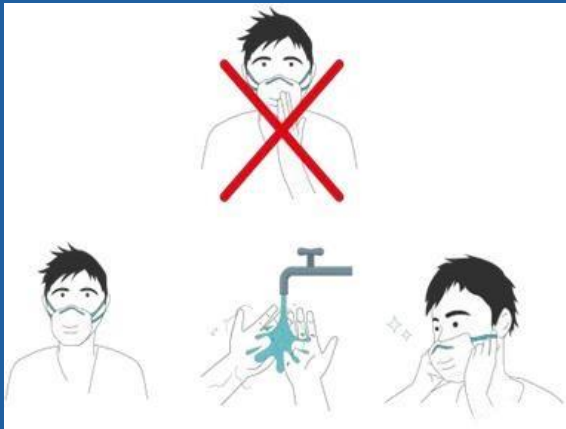

Niño

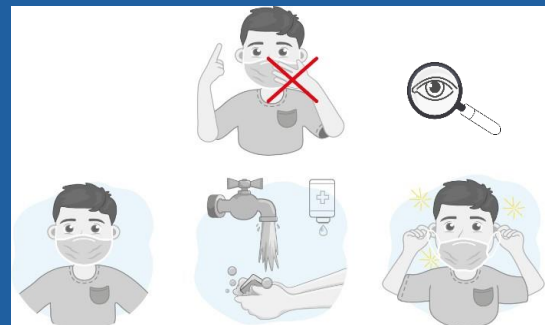

9.3 Retirada de la mascarilla

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. quitarse los guantes de protección;
2. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
3. retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
4. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

EMBALAJE, MARCADO E INSTRUCCIONES DE USO



Lavado y secado de la mascarilla

Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente habitual, a una temperatura de lavado de 60 °C



Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.

No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.

Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.

Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

Eliminación de la mascarilla

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe desechar.

1. Procedimiento para desechar la mascarilla

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.

EMBALAJE, MARCADO E INSTRUCCIONES DE USO



Ejemplo de un contenedor con tapa y control no manual

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

Duración de uso máximo continuado

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.

No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

Adulto



Niño

